



Sidst revideret maj 2024



# Brugervejledning

Dropfodsorthose med led

**SN**

**REF**



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



## Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye dropfodsorthose, som du har modtaget efter læge-lig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af ortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Dropfodsorthosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du requirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

## Beskrivelse af produkt

### Funktion

Ortosens funktion er at løfte foden fra underlaget, når benet svinges frem; gøre foden mere stabil og til en vis grad hindre overstrækning i knæledet. Det vil sige, ortosen kompenserer for en muskelsvagthed i benet, og benyttes oftest i forbindelse med spasticitet. Ortosen kan enten sidde indvendigt eller udvendigt på fodtøjet.

### Indikation

Neuromuskulære sygdomme der er medfødte, erhvervet senere i livet eller opstået efter traume. Hyppigste diagnoser er hjerneblødning, blodprop i hjernen, sclerose og traume.

### Materialer

Materiale valget kan være metal, læder, skind, plast og kulfiber.

### Behandlingstid for midlertidige produkter

Efter lægens anvisninger.

### Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

## Brug af produktet

### Påtagning

Efter bandagistens anvisninger.

### Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.

### Pleje af huden

Huden skal holdes ren og - så vidt mulig - tør. For meget fugt kan give hudproblemer. Vask huden med en parfumefri, hudvenlig sæbe og smør huden med en god parfumefri lotion dagligt.

### Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre dropfod-orthosens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at ortosens pasform er forringet.

### Særlige risici

Der kan opstå trykmærker fra dropfodsorthosen. Disse skal være forsvundet cirka 20 minutter efter, du har taget ortosen af. Ved vedvarende trykgener skal du kontakte din bandagist. Hvis du har nedsat følelse (neuropati) i ben og fod, er det specielt vigtigt, du er opmærksom på trykgener, og vi opfordrer dig til at undersøge ben og fod flere gange dagligt.

### Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de



### **Rengøring**

Skind er et naturmateriale, som er rart at have mod huden. Men det suger fugt, så du må ikke vaske det under vand. Brug i stedet en let fugtig klud til at tørre skindet af. Det er vigtigt, at skindet får lov at lufttørre. Der må derfor ikke bruges gen-stande med varme elementer som for eksempel hårtørre, radiator mv. til at tørre ortosen. Plast kan tåle vand og sæbe, men en klud med hushold-ningssprit kan også bruges som rengøringsmid-del. Undgå direkte varme på plasten. Metal og kulfiber på en ortose kan holdes rent med en let fugtig klud.

### **Vedligeholdelse**

Led af metal vedligeholdes ved at holde dem fri for snavs og fnug og ved at dryppe olie ind i led-det. Det kan være en god idé at bestille tid hos bandagisten for at få en rensning af leddet, da dette vil forlænge holdbarheden. Velcrolukninger skal altid holdes lukket, for at der ikke skal sætte sig snavs og fnug i materialet. Dette vil forlænge lukningernes holdbarhed.

### **Bortskaffelse/returnering**

Når dropfodsortosen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlerti-dige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet. Elektriske aggregater i hjælpemidler skal bortskaffes på forsvarlig og miljørigtig vis, og vi anbefaler, du afleverer dem til en af Sahvas afdelinger.

### **Reparation/Fornyelse af produkt**

#### **Ansøgningsregler**

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

### **Garanti og reklamation**

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, fore-tager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væ-sentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

### **Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter**

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

